



## Gebruiksaanwijzing Pari Sinus 2



vernevelaarinfo.nl/  
downloads/videos

Voor een goede werking van uw vernevelapparaat is het belangrijk dat u deze op de juiste manier gebruikt. Houd u daarom aan de volgende instructies.

### Voor u gaat starten met vernevelen

- Was uw handen zorgvuldig.
- Bij gebruik van verschillende medicatie in dezelfde medicijnkamer is het nodig alle onderdelen tussendoor grondig af te spoelen.
- Zorg dat u goed rechtop zit.

### Vernevelen

- Sluit 1 neusgat met het bijgeleverde neusdopje (of duw 1 neusgat dicht met uw vinger). Dit doet u om vacuüm te creëren in het hoofd.
- Stop de vernevelaar in het andere neusgat en sluit het strottenhoofd af door tijdens het vernevelen "inggggggggggg" te zeggen en houd dit zo lang als mogelijk vast. Ademen tijdens het vernevelen is niet mogelijk. Als het niet meer gaat, zet dan de vernevelaar uit en kom even op adem. Ga daarna verder met vernevelen, net zo lang tot het medicijn op is. Na elke adempauze wissel je van neusgat, zodat alle holtes bereikt worden.

Door vacuüm in het hoofd te creëren kan er een pijnlijke druk worden ervaren in het hoofd. Als dit gebeurt zet dan de vernevelaar uit en las even een pauze in tot het weer gaat. Ga daarna verder met de therapie.

### Tips

- Laat geen verneveldampen ontsnappen tijdens het vernevelen. Gebeurt dit, dan goed het strottenhoofd afsluiten (inggggggggggg).
- Heeft u na het vernevelen een droge keel veroorzaakt door restjes medicatie? Drink dan na het vernevelen warme thee of koffie om de medicatierestjes weg te spoelen.

### Verneveltijd

De totale verneveltijd bedraagt gemiddeld 2,5 minuut per neusgat. Als u tussendoor moet stoppen kan de totale verneveltijd langer zijn.

### Vernevelslang

Het slangstelsel bestaat uit twee identieke slangen met ieder een andere aansluiting. Iedere aansluiting past maar op één manier. U kunt de slangen dus nooit verkeerd aansluiten.





## Schoonmaakinstructie Pari Sinus 2

Voor een goede werking van uw vernevelapparaat is het belangrijk dat u deze goed schoonhoudt. Houd u daarom aan de volgende instructies.

### Vernevelslangen

- Neem de slangen af met een lichtvochtige doek.
- Zit er nog condens in de slang? Blaas de slang dan door op de compressor zonder het aansluiten van de vernevelaar.

### Vernevelaar (na iedere vernevelbeurt)

- Ontkoppel de vernevelaar van de vernevelslangen.
- Haal alle onderdelen uit elkaar.
- Spoel alle onderdelen goed af onder handwarm kraanwater.
- Dompel alle onderdelen 5 minuten onder in handwarm kraanwater met 3 druppels mild afwasmiddel.
- Borstel forse vervuiling eraf met een zachte (baby) tandenborstel.
- Spoel alles af onder warm kraanwater.
- Schud het overtollige water eraf.
- Laat de onderdelen drogen aan de lucht op een schone pluïsvrije theedoek.

### Vernevelaar (1x per week)

- Voer altijd eerst bovenstaande handelingen uit.
- Alle onderdelen moeten vervolgens worden uitgekookt.
- Breng een pan met ruim kraanwater aan de kook. (Het gebruik van een magnetronsterilisator voor babyflessen is ook toegestaan)
- Leg, nadat het water kookt, alle onderdelen in de pan. Zorg ervoor dat de onderdelen de bodem van de pan niet raken. Hierdoor kan het gaan smelten.
- Laat alles 5 minuten koken.
- Haal de onderdelen voorzichtig uit de pan en schud het overtollige water eraf.
- Laat de onderdelen drogen aan de lucht op een schone pluïsvrije theedoek.
- Zorg bij het in elkaar zetten dat alle onderdelen netjes sluiten.

### Compressor

1x per week afnemen met een lichtvochtige doek.

### Levensduur vernevelaar

1 jaar

### Jaarlijks onderhoud

Westfalen Medical komt 1x per jaar langs om de compressor te meten en het filter te vervangen.

