



## Gebruiksaanwijzing eFlow<sup>®</sup> rapid, Tolero, Altera en Zirela



vernevelaarinfo.nl/  
downloads/videos

De Tolero, Altera en Zirela vernevelaar krijgt u meegeleverd bij specifieke medicatie.

Gebruik deze vernevelaars uitsluitend voor de bijbehorende medicijnen. Vernevelt u wat anders, dan moet dit in de eFlow<sup>®</sup> rapid vernevelaar worden verneveld.

### In elkaar zetten

- Plaats de aerosolproductie-eenheid (4b) in het medicatiereservoir (4a). **Let op:** raak hierbij het metalen gedeelte in het midden van de aerosolproductie-eenheid (4b) niet aan.
- Plaats het inademventiel (4c) in de vernevelkamer (4d).
- Sluit nu de vernevelkamer (4d) op het medicatiereservoir/mesh (4a).
- Pak het mondstuk (5) en sluit deze aan op de vernevelkamer. Indien u antibiotica vernevelt plaats dan de Pari Filter/Valve Set tussen de vernevelkamer en het mondstuk. Gebruik in dit geval het mondstuk zonder een blauw uitademingsventiel (zie afb. A).
- Het geheel kan nu worden vastgeklikt aan het vernevelaarsnoer (2) die aan de besturingseenheid (eBase) is gekoppeld.
- Schenk de medicatievloeistof in het medicatiereservoir/ mesh (4a) en sluit af met de dekseldichting (3b) en afsluitkap (3a).

### Vernevelen

- Sluit de eBase aan op het netstroom of gebruik de accu.
- Zorg ervoor dat u goed rechtop zit.
- Sluit uw lippen goed rond het mondstuk.
- Zet de vernevelaar aan: de besturingseenheid (eBase) start en vernevelt na een aftelling van 3 naar 0.
- Houd de vernevelaar rechtop.
- Apparaat schakelt zichzelf uit bij einde behandeling en er zal een vinkje op de besturingseenheid (eBase) verschijnen.

Er mag een kleine hoeveelheid medicatie achterblijven.

**Let op:** Bij gebruik van verschillende medicatie in de eFlow<sup>®</sup> rapid, de onderdelen tussendoor grondig afspoelen.



Bij gebruik van antibiotica gebruikt u de Pari Filter/Valve Set om te voorkomen dat bij uitademing medicatie in de ruimte komt. Dit ter bescherming van de mensen om u heen.

### Verneveltijd

Circa 5 minuten.

### Levensduur vernevelaar en toebehoren

6 maanden, bij gebruik van eFlow<sup>®</sup> rapid.

### Netstroom of accu

- Voor netstroom is er een netstroomkabel bijgeleverd.
- Gebruik de netstroomkabel om de accu van de eBase op te laden of om direct mee te vernevelen.





## Schoonmaakinstructie eFlow<sup>®</sup> rapid, Tolero, Altera en Zirela

Voor een goede werking van uw vernevelapparaat is het belangrijk dat u deze goed schoonhoudt. Houd u daarom aan de volgende instructies.

### Besturingseenheid/eBase en vernevelsnoer

1x per week met een licht vochtige doek schoonmaken.

### Vernevelaar (na iedere vernevelbeurt)

- Ontkoppel het vernevelaarsnoer van de vernevelaar.
- Haal alle onderdelen uit elkaar (ook de deksel en de Pari filter/Valve Set).
- Giet overtollige medicatie uit het reservoir.
- Spoel de vernevelaar goed af onder handwarm kraanwater. **Let op:** maak de aerosolproductie-eenheid nooit met een borstel of andere voorwerpen schoon.
- Dompel alle onderdelen 5 minuten onder in handwarm kraanwater met 3 druppels afwasmiddel.
- Spoel alle onderdelen nog éénmaal af onder handwarm kraanwater zodat alle zeepresten worden verwijderd.
- Laat de onderdelen drogen aan de lucht op een schone, pluisvrije theedoek.



**Let op!** Gebruik de Easycare nooit vaker dan 2x per week. Dit heeft een averechts effect op de verneveltijd.

**Let op!** De aerosolproductie-eenheid mag alleen aan de zijkanen worden vastgepakt.

### Easycare (1x per week gebruiken)

- Klik de Easycare open (**zie afb. B**).
- Klik de aerosolproductie-eenheid in de Easycare (**zie afb. C**).
- Klik de Easycare dicht.
- Sluit de Easycare aan op het vernevelsnoer.
- Spuit circa 5 ml steriel water in de opening (gedestilleerd water en 2 spuitjes zijn meegeleverd).
- Houd de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt totdat het Easycare logo verschijnt.
- De eBase schakelt uit wanneer het spoelen klaar is.
- Na uitzetten kan er verneveldamp uit de opening komen. Dit is normaal.
- Verwijder het vernevelsnoer.
- Open de Easycare en verwijder de aerosolproductie-eenheid.
- Laat de overgebleven vloeistof uit de Easycare lopen.

### Na elk gebruik van de Easycare

- Reinig de Easycare met handwarm kraanwater en een mild afwasmiddel.
- Opende klapt laten drogen aan de lucht.
- Kook de Easycare nooit uit!

Kook de medicatiereservoir/mesh uit of reinig deze in de sterilisator nadat u de Easycare gebruikt heeft.

### Vernevelaar (1x per week)

- Voer eerst alle bovenstaande stappen uit.
- Alle onderdelen moeten worden uitgekookt.
- Breng een pan met kraanwater aan de kook.
- Leg, nadat het water kookt, alle onderdelen in de pan. Zorg ervoor dat de onderdelen de bodem van de pan niet raken. Hierdoor kan het gaan smelten.
- Laat alles 5 minuten koken.
- Haal de onderdelen voorzichtig uit de pan en schud het overtollige water eraf.
- Laat de onderdelen aan de lucht drogen op een schone, pluisvrije theedoek.