



Gebruiksaanwijzing vernevelapparaat Philips InnoSpire Deluxe met sidestream

Voor een goede werking van uw vernevelapparaat is het belangrijk dat u deze op de juiste manier gebruikt. Houd u daarom aan de volgende instructies.

In elkaar zetten

- De onderdelen passen maar op één manier goed in elkaar.
- Let erop dat onderdelen goed op elkaar aansluiten.

Vernevelen

- Zit goed rechtop.
- Draai medicijnreservoir open, giet hierin de medicatievloeistof.
- Sluit het mondstuk goed rond de mond.
- Adem rustig en diep in, adem ontspannen uit.
- Plaats de hand niet over de opening aan de achterzijde van de vernevelaar.
- Houd de vernevelaar horizontaal.
- De behandeling is klaar als er geen nevel meer uit de vernevelaar komt.
- Er mag een kleine hoeveelheid medicijn in de vernevelaar achterblijven.
- Bij een verlenging van de verneveltijd de vernevelaar grondig schoonmaken.

Verneveltijd

- Circa 4 à 5 minuten

Algemeen

- Volg de schoonmaakinstructies stipt op. (zie achterzijde)

Accu

- De accu werkt alleen op netstroom.





Schoonmaakinstructie vernevelapparaat Philips InnoSpire Deluxe met sidestream

Voor een goede werking van uw vernevelapparaat is het belangrijk dat u het goed schoonhoudt. Houd u daarom aan de volgende instructies.

Schoonmaakinstructie compressor

- 1 x per week of bij zichtbare vervuiling afnemen met een vochtige doek.

Filter compressor

- 1 x per 3 maanden vervangen.
- 1 x per 2 weken controleren op vervuiling.

Vernevelslang

- Wanneer er vocht in de slang zit, vernevelaar van de slang halen en compressor aanzetten, totdat het vocht uit de slang is geblazen.



Schoonmaakinstructies vernevelaar

Na elke behandeling: haal alle onderdelen uit elkaar.

- Doe drie druppels afwasmiddel in handwarm leidingwater (40 graden).
- Dompel de vernevelaar gedurende 5 minuten onder.
- Borstel forse verontreiniging af.
- Spoel grondig af onder handwarm leidingwater.
- Laat de vernevelaar drogen op schone, pluisvrije theedoek.

1 x per dag: Vernevelaar in elkaar zetten.

- Breng een pan met ruim water aan de kook.
- Doe de vernevelaar in de pan als het water kookt.
- De vernevelaar mag de bodem van de pan niet raken, dit in verband met smeltgevaar.
- Het water met de vernevelaar 10 minuten laten doorkoken.
- Spoel de vernevelaar daarna grondig af onder handwarm leidingwater.
- Laat de vernevelaar drogen op een schone, pluisvrije theedoek.

In plaats van bovengenoemd protocol mag er ook een sterilisator worden gebruikt voor babyflessen in de magnetron.

Minimale schoonmaakinstructies vernevelaar

Na elke behandeling: haal alle onderdelen uit elkaar.

- Grondig afspoelen onder handwarm leidingwater.

1 x per dag: alle onderdelen uit elkaar halen.

- Protocol met sop en grondig afspoelen.

1 x per week: vernevelaar in elkaar zetten.

- Protocol met uitkoken.

Vervanging onderdelen

- Compressor 1 x per 5 jaar.
- Vernevelaar en slang 1 x per jaar.
- Filter compressor 1 x per 3 maanden.
- **Westfalen Medical komt 1 x per jaar langs om de druk van de compressor te testen.**

