



Gebruiksaanwijzing


Cangaroo® Sterilizer Electric Steam 3 in 1

Voor een goede werking van uw Sterilizer is het belangrijk dat u deze op de juiste manier gebruikt. Houdt u daarom aan de volgende instructies.

Voordat u de eerste keer de sterilizer gaat gebruiken (zonder de onderdelen van de vernevelaar erin)

- Meet met de maatbeker(7) 90 ML (gekookt, afgekoeld) water en giet het in het reservoir aan de onderkant van de sterilizer.
- Plaats de hoofdbehuizing van de sterilizer(3), mand(2) en deksel(1) er bovenop.
- Sluit het netsnoer aan op een stopcontact (geen verlengsnoer) en zet de aan/uit-schakelaar(6) aan.
- Druk nu de startknop(4) in om het sterilisatieproces te activeren.
- Zodra het water 100 graden heeft bereikt, wordt het omgezet in stoom. Wanneer het water volledig is verdamppt, schakelt de sterilizer automatisch uit.
- Laat de sterilizer ong. 3 min. afkoelen. Zet de aan/uit-schakelaar(6) uit, en haal de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder de deksel(1), de mand(2) en de hoofdbehuizing van de sterilizer(3) en giet het water af dat niet is verdamppt.
- Maak de onderdelen droog en de sterilizer is klaar voor gebruik.

Alle onderdelen van het apparaat

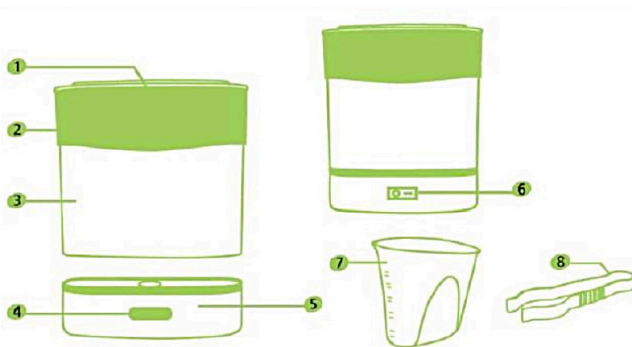

1. Deksel
2. Mand
3. Hoofdbehuizing van de sterilizer
4. Startknop
5. Basis
6. Aan/Uit knop
7. Maatbeker
8. Tang voor flessen

Regulier gebruik sterilizer:

- Meet met de maatbeker(7) 90 ML (gekookt, afgekoeld) water en giet het in het reservoir aan de onderkant van de sterilizer.
- Plaats de hoofdbehuizing van de sterilizer(3), mand(2) en plaats deksel(1) er bovenop.
- Haal alle onderdelen van de vernevelaar uit elkaar en plaats deze in de sterilizer. Let op dat je de vernevelaar onderdelen, met de openingen naar beneden, in de sterilizer plaatst. Dit om te voorkomen dat hier water in komt te staan (*bij gebruik Ineb, onderdelen altijd in wasmandje plaatsen die bij de Ineb geleverd is*).
- Sluit het netsnoer aan op een stopcontact (geen verlengsnoer) en zet de aan/uit-schakelaar(6) aan.
- Druk nu de startknop(4) in om het sterilisatieproces te activeren.
- Zodra het water 100 graden heeft bereikt, wordt het omgezet in stoom. Wanneer het water volledig is verdamppt, schakelt de sterilizer automatisch uit.
- Laat de sterilizer ong. 3 min. afkoelen. Zet de aan/uit-schakelaar(6) uit, en haal de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder de deksel(1).
- Was eerst je handen of gebruik de tang(8) en haal nu de gesteriliseerde onderdelen uit de sterilizer.
- Schud alle onderdelen goed af, leg ze op een pluisvrije theedoek, en laat de onderdelen drogen aan de lucht.
- Verwijder de mand(2) en de hoofdbehuizing van de sterilizer(3) en giet het water af dat niet is verdamppt.
- Maak de onderdelen droog en de sterilizer is weer klaar voor gebruik.

Tips voor het gebruik van de sterilizer

- Eerst vernevelaar reinigen, voordat je de sterilizer gebruikt.
- Eerst water erin, dan pas inschakelen.
- Tijdens de sterilisatie open je de deksel nooit! Als het proces wordt verstoord, dan worden de onderdelen niet steriel!
- Was eerst je handen (of gebruik de tang) voordat je de gesteriliseerde onderdelen uit de sterilizer haalt.



Schoonmaakinstructie Cangaroo® Sterilizer Electric Steam 3 in 1

Voor een goede werking van uw Sterilisator is het belangrijk dat u het goed schoonhoudt. Houdt u daarom aan de volgende instructies.

Schoonmaak sterilisator (na gebruik) 1x per week


- Verwijder de deksel(1), mand(2), hoofdbehuizing van de sterilisator(3) en giet het water af dat niet is verdampt.
- Leg de onderdelen deksel(1), mand(2), hoofdbehuizing van de sterilisator(3), maatbeker(7) en tang(8) in heet water met 3 druppels afwasmiddel.
- Maak de onderdelen schoon met een spons (geen schuurspons).
- Spoel alles goed af en schud overtollig water af.
- Maak de onderdelen droog en de sterilisator is weer klaar voor gebruik.

Kalkaanslag in de sterilisator?

- Giet 100ml azijn en 200ml koud water in het reservoir. Laat dit zo staan tot de kalkaanslag oplost. Giet de azijn en het water uit de basis(5) en reinig het goed met een vochtige doek, zodat er geen vuil op de bodem achterblijft. Laat het nu goed drogen aan de lucht.



Alle onderdelen van het apparaat

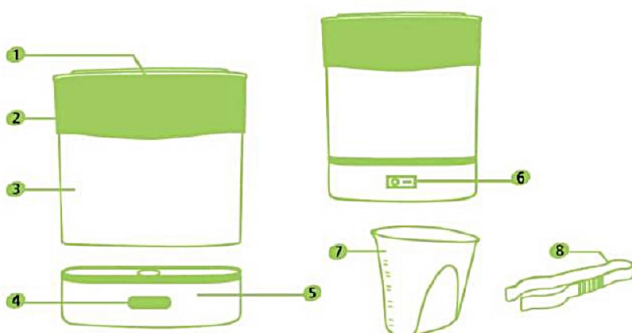

1. Deksel
2. Mand
3. Hoofdbehuizing van de sterilisator
4. Startknop
5. Basis
6. Aan/Uit knop
7. Maatbeker
8. Tang voor flessen

Tips voor het gebruik van de sterilisator

- Eerst vernevelaar reinigen, voordat je de sterilisator gebruikt.
- Eerst water erin, dan pas inschakelen.
- Tijdens de sterilisatie open je de deksel nooit! Als het proces wordt verstoord, dan worden de onderdelen niet steriel!
- Was eerst je handen (of gebruik de tang) voordat je de gesteriliseerde onderdelen uit de sterilisator haalt.